





**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**


26 febbraio 2020

Pagina 1 di 10

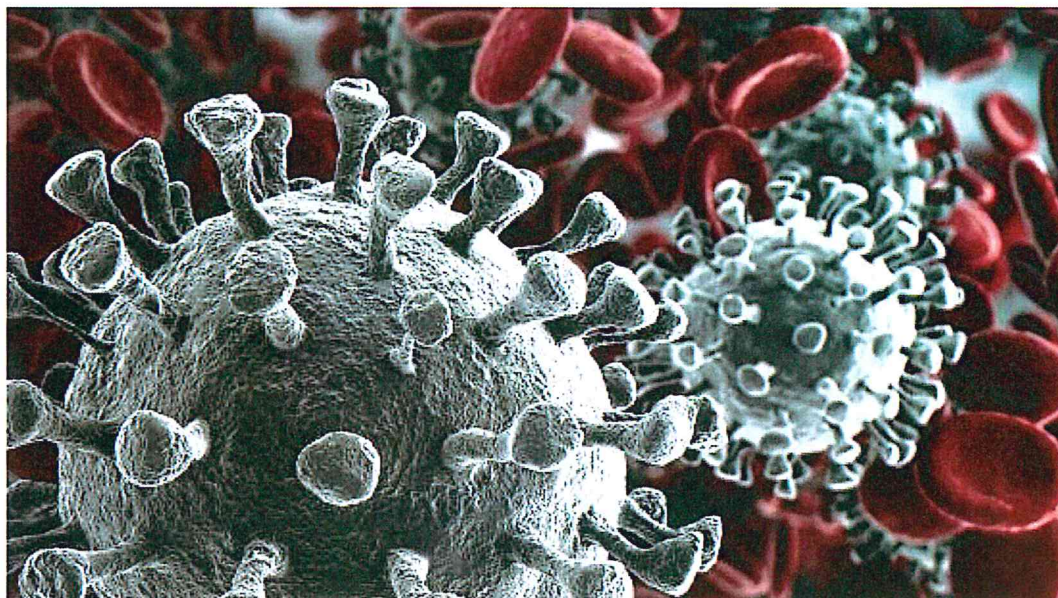

**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**

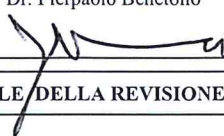REDAZIONE	VERIFICA E CONTROLLO	APPROVAZIONE	ID.
Dr.ssa Dorian Del Dot Ing. Giancarlo Murer in collaborazione la Struttura Medico Competente	Dr. Arrigo Andrenacci Dr. Antonio Ferro Dr. Giovanni Guarrera Dr.ssa Simona Sforzin Dr. Luca Fabbri	Direttore Sanitario Dr. Pierpaolo Benetollo 	114350302 data emissione 26 FEB. 2020
DOCUMENTO PRECEDENTE	CAUSALE DELLA REVISIONE		
///	Nuova stesura		

<p>Azienda Provinciale</p>  <p>per i Servizi Sanitari</p>	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEGLI OPERATORI ESPOSTI A RISCHIO DI COVID-19</p>	<p>26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Pagina 2 di 10</p>
--	--	---

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'istruzione operativa si applica agli operatori che entrano in contatto con casi sospetti o confermati di infezione da COVID-19, sia nei contesti ospedalieri che in quelli territoriali (domicilio, strutture adibite all'isolamento). Per i contesti territoriali sono stati predisposti dei kit con i dispositivi di barriera previsti nell'istruzione operativa di seguito descritta.

ISTRUZIONE OPERATIVA

A. FASE DI VESTIZIONE

La sequenza da seguire nella vestizione è sintetizzata nell'all. 1

Il posizionamento dei dispositivi di barriera deve essere effettuato prima di esporsi al rischio: prima di entrare nel luogo dove si trovano i casi sospetti o confermati (es. stanza, appartamento)

1. Eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica frizionando per almeno 20-30 secondi (Septaman®, Esosan®)

Si ricorda che la presenza di monili e di unghie lunghe può compromettere l'intervento di igiene delle mani e l'integrità dei guanti.

2. Indossare il primo paio di guanti monouso in nitrile da 30 cm
3. Indossare il sovracamice monouso coprendo completamente il busto dal collo alle ginocchia, le braccia fino al polso e avvolgendo la schiena. Fissare il sovracamice dietro al collo e alla vita
4. Posizionare il facciale filtrante FFP 2 o FFP3 ed eseguire il test di tenuta:
 - tenendo il rovescio del facciale rivolto verso l'alto, aprire i lembi, superiore e inferiore, fino ad ottenere una forma a coppa





**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**

26 febbraio 2020

Pagina 3 di 10

- assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente aperti



- reggere il facciale a coppa in una mano con il lato aperto verso il viso
- prendere entrambi gli elastici con l'altra mano
- tenere il facciale sotto il mento, con lo stringi naso in alto, e tirare gli elastici sopra la testa



- posizionare l'elastico superiore sulla sommità della testa (sopra le orecchie) e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere incrociati



<p>Azienda Provinciale</p> <p>per i Servizi Sanitari</p>	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEGLI OPERATORI ESPOSTI A RISCHIO DI COVID-19</p>	<p>26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Pagina 4 di 10</p>
--	--	---

- aggiustare i lembi superiore e inferiore per ottenere un indossamento confortevole, assicurandosi che i lembi non siano ripiegati all'interno
- usando entrambe le mani modellare lo stringinaso sulla parte inferiore del naso per assicurare un buon comfort ed una buona tenuta



Attenzione: modellare lo stringinaso con una sola mano può provocare una perdita di efficienza del facciale

- per verificare la tenuta, appoggiare completamente le mani sul facciale ed inspirare rapidamente



La prova di tenuta si effettua in pressione negativa, ponendo le mani a coppa sul facciale filtrante ed inspirando rapidamente. Se si dovessero avvertire problemi di tenuta, ripetere le operazioni di indossamento

Nelle procedure a rischio di schizzo, qualora venga utilizzato un facciale filtrante valvolato, è necessario posizionare una mascherina chirurgica sopra al facciale filtrante.

	<p>ESPORSI AL RISCHIO SOLO SE LA PROVA DI TENUTA VIENE SUPERATA</p>
	<p>Attenzione: NON utilizzare il facciale filtrante in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del facciale</p>



**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**

26 febbraio 2020

Pagina 5 di 10

5. posizionare gli occhiali di protezione: indossarli solo dopo aver posizionato il facciale filtrante. Scuotere la testa con bruschi movimenti alternati orizzontali/verticali per verificare che durante l'utilizzo gli occhiali non vengano scalzati
6. Concludere la vestizione posizionando la cuffia e il secondo paio di guanti monouso in nitrile da 30 cm (assicurandosi che coprano il polsino del camice)

DURANTE LE MANOVRE ASSISTENZIALI EVITARE DI TOCCARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL VISO (OCCHIALI E FACCIALE FILTRANTE) PER PREVENIRNE LA CONTAMINAZIONE

QUALORA VENGA UTILIZZATO IL FACCIALE FILTRANTE VALVOLATO E SI EFFETTUINO MANOVRE ASSISTENZIALI IN CUI E' PREVISTO IL RISCHIO DI SCHIZZO DI LIQUIDI BIOLOGICI, VA SOVRAPPOSTA AL FACCIALE FILTRANTE LA MASCHERINA CHIRURGIA TIPO IIR



**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**

26 febbraio 2020


Pagina 6 di 10

B. FASE DI SVESTIZIONE

La sequenza da seguire nella svestizione è sintetizzata nell'all. 2

La rimozione dei dispositivi di barriera deve essere effettuata al termine dell'esposizione al rischio e quindi all'esterno del luogo dove si trovano i casi sospetti o confermati (es. fuori dalla stanza, fuori dall'appartamento)

1. iniziare la svestizione rimuovendo insieme il secondo paio di guanti e il sovracamice, che va arrotolato su sé stesso, per prevenire la contaminazione della divisa/vestiti

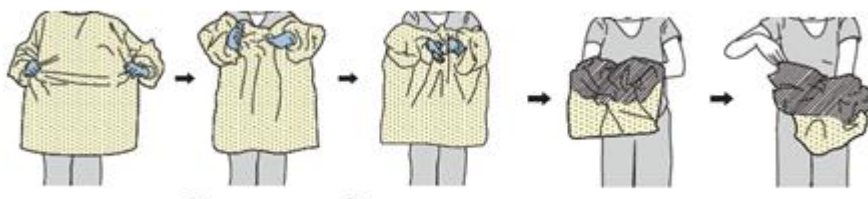

2. smaltire il secondo paio di guanti e sovracamice nel contenitore/sacco verde per rifiuti pericolosi a rischio infettivo
3. rimuovere la cuffia e smaltirla nel contenitore/sacco verde per rifiuti pericolosi a rischio infettivo
4. togliere gli occhiali di protezione prendendoli dalle stanghette oppure dalla fascia elastica (che sono le parti pulite)
5. fare attenzione a non toccare la parte anteriore che invece va considerata contaminata
6. mettere gli occhiali di protezione in un'arcilla/sacchetto (es. sacchetto del kit) per un successivo riutilizzo

Gli occhiali vanno riutilizzati solo dopo la detersione e successiva decontaminazione con una soluzione di cloro donatori (es. Giodiclonil® 1000 ppm – 1cp da 4,6 g/2 litri di acqua; oppure alcol 70%)



**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTITONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**


26 febbraio 2020

Pagina 7 di 10

7. rimuovere il facciale filtrante toccando solamente gli elastici e ricordando che la parte anteriore va considerata contaminata



8. smaltire il facciale filtrante nel contenitore/sacco verde per rifiuti pericolosi a rischio infettivo
9. rimuovere il primo paio di guanti usando la tecnica guanto-guanto/pelle-pelle

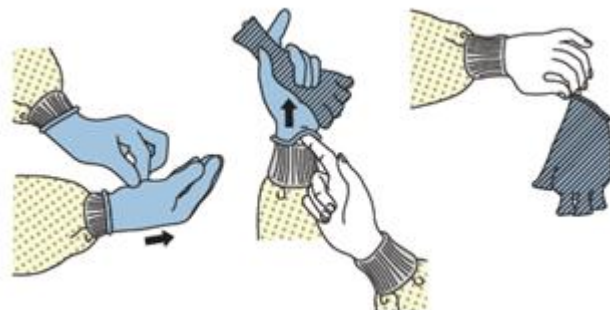

10. eseguire l'igiene delle mani con frizione alcolica e frizionare per almeno 20-30"



**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**

26 febbraio 2020

Pagina 8 di 10

ALL. 1 SEQUENZA POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI DI BARRIERA

1	ESEGUIRE IGIENE DELLE MANI	
5	INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI MONOUSO	
2	INDOSSARE IL SOVRACAMICE	
3	INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE ED ESEGUIRE IL TEST DI TENUTA	
4	INDOSSARE GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE E LA CUFFIA	
5	INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI MONOUSO	




**ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE
PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE
DEGLI OPERATORI ESPOSTI A
RISCHIO DI COVID-19**

26 febbraio 2020

Pagina 9 di 10

ALL. 2 SEQUENZA RIMOZIONE DISPOSITIVI DI BARRIERA

1	RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI E IL SOVRACAMICE	
	RIMUOVERE LA CUFFIA E GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE	
4	RIMUOVERE IL FACCIALE FILTRANTE	
1	RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI	
5	ESEGUIRE IGIENE DELLE MANI	

<p>Azienda Provinciale</p>  <p>per i Servizi Sanitari</p>	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE PER LA VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEGLI OPERATORI ESPOSTI A RISCHIO DI COVID-19</p>	<p>26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Pagina 10 di 10</p>
--	--	---

Riferimenti:

1. Australian Government (2019). Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in Healthcare

<https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-guidelines-prevention-and-control-infection-healthcare-2019>

2. CDC (21/02/2020). Sequence for putting on and remove PPE

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html>

3. Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (2017). Notions de base en prévention et contrôle des infections Santé et sécurité du travail

<https://asstsas.qc.ca/publication/notions-de-base-en-prevention-et-contrôle-des-infections-santé-et-sécurité-du-travail-0>

4. COREB(18/02/2020). Repérer et prendre en charge un patient suspect COVID-19

<https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/2019-ncov-fichesoignants22janv-vf.pdf>

5. CDC (2012) Understanding Respiratory Protection Against SARS

<https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/factsheets/respsars.html>